

BEOOGD GEBRUIK

De simpli-COLLECT™-afnamekit voor uitstrijkjes is bedoeld voor het zelf afnemen en verzenden van vaginale uitstrijkjes voor in vitro diagnostische tests. Uitstrijkjes kunnen door een onervaren gebruiker in een zorgomgeving of niet-zorgomgeving voor verzending worden afgenomen en voorbereid.

BEPERKINGEN AAN DE PROCEDURE

- Deze kit mag alleen worden gebruikt voor de afname van vaginale uitstrijkjes.
- Zwangere vrouwen mogen de simpli-COLLECT™-afnamekit voor uitstrijkjes niet gebruiken.
- Afname van vaginale uitstrijkjes is niet bedoeld als vervanging van onderzoeken van de baarmoederhals voor de diagnose van vrouwelijke urogenitale infecties. Patiënten kunnen cervicitis, urethritis, urineweginfecties of vaginale infecties hebben door andere oorzaken of gelijktijdige infecties met andere ziekteverwekkers.
- Vrouwen die symptomen hebben die duiden op een ontstekingsziekte in het bekken, mogen het zelf afgenomen vaginale uitstrijkje niet gebruiken als vervanging voor een bekkenonderzoek.

RICHTLIJNEN VOOR AFVALINZAMELING: INZAMELING VAN PAPIER EN PLASTIC		
Verpakkingsmateriaal	Symbool	Definitie
Buitenwikkel van retourdoos		Gemengd papier
Buisje- en dophouder		Polyethyleentereftalaat
Verpakking van monsterbuisjes		Gewoon papier en ethyleenvinylacetaat (EVA)
Verpakking van afnamekit		Gewoon papier
Gebruiksaanwijzing		Gewoon papier
Verzendzak		Polyethyleen met lage dichtheid
Etiketvel voor buisje en zak		Gewoon papier

Items met het recyclingsymbool kunnen worden gerecycled. Houd u aan de nationale, regionale en lokale voorschriften voor afvalverwerking.

BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN	
	Uitroepteken
	Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek
	In-vitrotest
	Referentienummer
	Niet hergebruiken
	Temperatuurgrens
	Vervaldatum
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Hier opentrekken
	Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd en raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Belangrijke informatie
	Wattenstaafje
	Monsterbuisje met vloeistofbuffer
	Wereldwijd handelsartikelnummer (GTIN)
	Geproduceerd door
	Partijnummer
	Gesteriliseerd met behulp van straling
	Wattenstaafje voor monsterafname
	Biologische risico's
	Bewaren bij
	Unieke kit-ID
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap/Europese Unie
	Fabrikant

SAMENVATTING EN UITLEG VAN DE TEST

Met de simpli-COLLECT™-afnamekit voor uitstrijkjes kunt u zelf zonder toezicht vaginale uitstrijkjes maken (bijv. thuis of op een andere plek buiten een klinische omgeving).

U neemt het monster af, brengt het over naar het monsterbuisje en retourneert het voor analyse naar het laboratorium.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- VOLG ALLE INSTRUCTIES** in de gebruiksaanwijzing. Als u de instructies niet opvolgt, kan het resultaat onjuist zijn.
- Buiten het bereik bewaren van kinderen tot 14 jaar.
- MAAK GEEN GEBRUIK** van de simpli-COLLECT™-afnamekit voor uitstrijkjes als de kit beschadigd is, de kitdoos open is, de verzegeling van de kit is verbroken of als de kit lekt. **WERP ONGEBRUIKTE, BESCHADIGDE OF LEKKENDE KITS WEG** overeenkomstig de nationale, regionale en lokale voorschriften.
- MAAK GEEN GEBRUIK** van de simpli-COLLECT-afnamekit voor uitstrijkjes als de **VERVALDATUM** VAN DE KIT IS VERSTREKEN.
- MAAK GEEN GEBRUIK** van de simpli-COLLECT-afnamekit voor uitstrijkjes als u **ZWANGER** bent.
- Gebruik uitsluitend het wattenstaafje dat in de simpli-COLLECT-afnamekit voor uitstrijkjes is meegeleverd.
- Het monsterbuisje met vloeistofbuffer bevat een reinigingsmiddel.** De vloeistof in het buisje kan ernstige oogirritatie en lichte huidirritatie veroorzaken. Als de vloeistof in contact komt met uw ogen of huid, dient u voorzichtig gedurende enkele minuten met water te spoelen. Verwijder contactlenzen indien aanwezig en als dit gemakkelijk is en blijf spoelen. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt. **WAARSCHUWING:** veroorzaakt lichte huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Niet inslikken.
- Vermijd contact met huid en ogen.


OPSLAG

Bewaar de kit bij kamertemperatuur (tussen 15 °C en 30 °C of 59 °F tot 86 °F). Zorg ervoor dat alle testonderdelen vóór gebruik op kamertemperatuur zijn.

Sla het monster na afname op bij kamertemperatuur (tussen 15 °C en 30 °C of 59 °F tot 86 °F).

VERVALDATUM

MAAK GEEN GEBRUIK van de simpli-COLLECT™-afnamekit voor uitstrijkjes als de **VERVALDATUM** VAN DE KIT IS VERSTREKEN.

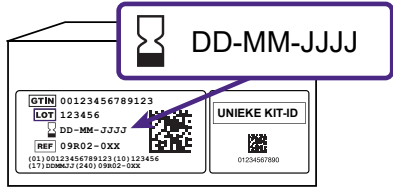

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Neem contact op met uw zorgverlener als u vragen hebt over retourverzending, testresultaten/diagnose of hulp bij het verkrijgen van een nieuwe kit.

Als u hulp nodig hebt bij het gebruik of de opslag van dit product, ga dan naar:

www.molecular.abbott/int/en/home/simpli-collect



VEILIGHEIDSMATREGELEN

IVD Voor in vitro diagnostisch gebruik

De volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing op: **Monsterbuisje met vloeistofbuffer**

Waarschuwing	
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H316	Veroorzaakt lichte huidirritatie.*
Preventie	
P264	Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Reactie	
P305+P351+P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
P332+P313	Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.*
P337+P313	Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

* Niet van toepassing indien verordening EG 1272/2008 (CLP) is geïmplementeerd.

Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op: www.molecular.abbott/int/en/home/simpli-collect

De Abbott-afnamekit wordt voor Abbott Molecular Inc. vervaardigd door MML Diagnostics Packaging, Inc., Troutdale, OR 97060 VS.

Abbott Molecular Inc. is de wettelijke fabrikant van de simpli-COLLECT-afnamekit voor uitstrijkjes.

De simpli-COLLECT™-afnamekit voor uitstrijkjes wordt in de Europese Unie geïmporteerd door Abbott Diagnostics GmbH, gevestigd te Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Duitsland.

Abbott Molecular Inc.
1300 East Touhy Avenue
Des Plaines, IL 60018 USA

EC REP Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany

© 2024 Abbott. Alle rechten voorbehouden.
Opgesteld in juli 2024

simpli-COLLECT is een handelsmerk van Abbott.
Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.



simpli-COLLECT™

Afnamekit voor uitstrijkjes
Gebruiksaanwijzing

Hulp nodig? Scan hier:



www.molecular.abbott/int/en/home/simpli-collect

Lees alle instructies voordat u begint.
Bewaar de doos. Die gebruikt u voor het terugsturen van uw monster.



nl
REF 09R02-005
en hoger
53-608482/R2

U EN UW GEZONDHEID STAAN VOOROP, DUS LATEN WE BEGINNEN!

Meer informatie op de andere zijde van de pagina



Hulp nodig? Scan hier.

www.molecular.abbott/int/en/home/simpli-collect

DE KIT UITPAKKEN

- Lees de instructies en zorg dat u deze begrijpt voordat u de kit gebruikt. **Als u de instructies niet opvolgt, kan het resultaat onjuist zijn.**
- Bewaar de kit vóór en na afname van het uitstrijkje bij kamertemperatuur (tussen 15 °C tot 30 °C of 59 °F tot 86 °F).
- Niet gebruiken als de doos bij levering niet is verzegeld of als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.** Neem contact op met uw zorgverlener voor een nieuwe kit.
- Pak de kit uit op een schoon, droog oppervlak.
- De vloeistof in het buisje kan irritatie veroorzaken als deze in contact komt met uw ogen of huid. Lees het gedeelte met waarschuwingen op de achterkant van deze instructies.
- Raadpleeg voor vragen over deze kit het gedeelte Technische ondersteuning op de achterkant van deze instructies.

INHOUD VAN DE KIT



VOORDAT U BEGINT


Lees de instructies en zorg dat u deze begrijpt voordat u de kit gebruikt. **Als u de instructies niet opvolgt, kan het resultaat onjuist zijn.**



1 VOORBEREIDEN

Voor deze stap hebt u nodig:

- Buisje (monsterbuisje met vloeistofbuffer)
- Buisje- en dophouder

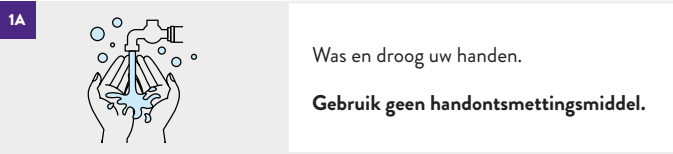

2 MONSTERAFNAME

Laten we beginnen! Geen zorgen, het is eenvoudig!

Voor deze stap hebt u nodig:



- Wattenstaafje



3 HET WATTENSTAAFJE OVERBRENGEN

Voor deze stap hebt u nodig:


- Buisje (rechttop in buisje- en dophouder)
- Wattenstaafje

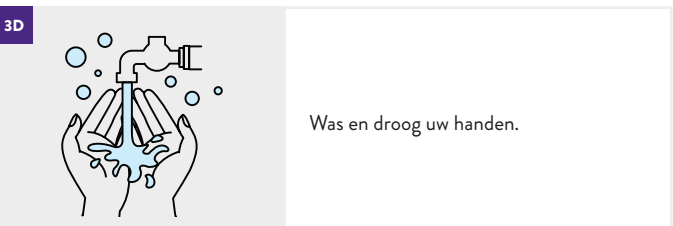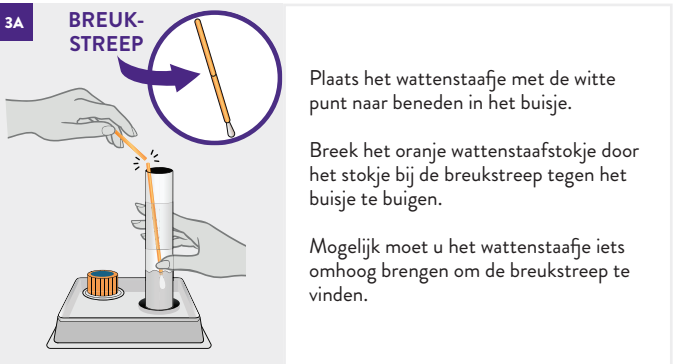

4 ETIKETINFORMATIE INVULLEN

Voor deze stap hebt u nodig:


- Balpen (blauwe of zwarte inkt - niet meegeleverd)
- Etiketvel voor buisje en zak
- Buisje (met wattenstaafje)
- Zak voor biologisch gevaarlijk materiaal

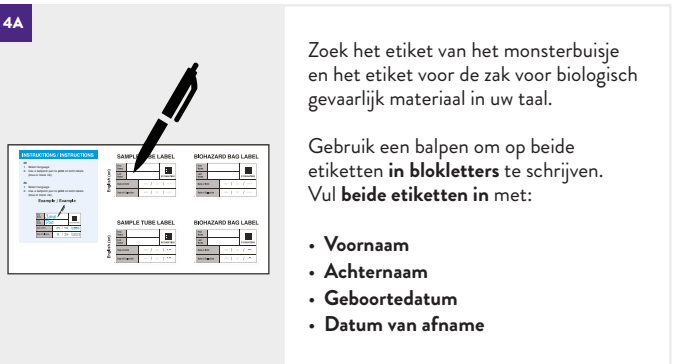

5 MONSTER TERUGSTUREN

Voor deze stap hebt u nodig:

- Retouretiket (meegeleverd in verzendzak)
- Buisje (met wattenstaafje)
- Zak voor biologisch gevaarlijk materiaal
- Retourdoos

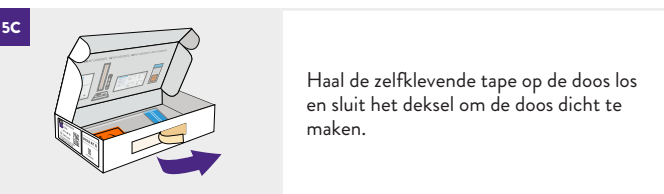

GEFELICITEERD! U hebt uw deel afgerond. Nu wordt uw monster naar het laboratorium vervoerd en getest. Praat met uw zorgverlener over uw resultaten.

